



Gebrauchsanleitung für die ORTHOS-Bissgabel

Bissgabel NICHT wiederverwendbar, 1 Bissgabel = 1 Patient
Bitte die restlichen Bissgabeln in der Praxis behalten, für Ihren nächsten Fall!

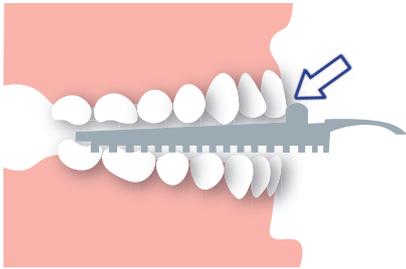


1. Schritt:

OK-Inzisiven an den Anschlag anstoßen lassen; Mittenmarkierung beachten. UK ohne Zahnkontakt 2-3 mal maximal vor und zurück schieben lassen.

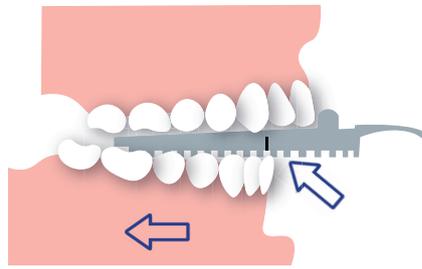


2. Schritt:

Bei retraler Lage zubeißen lassen und die Kerbe mit wasserfestem Stift markieren.

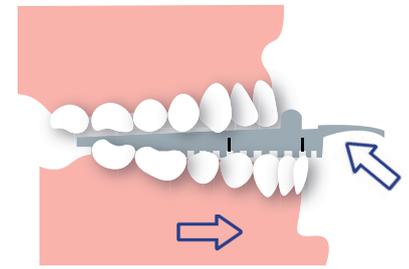


3. Schritt:

Patient* in maximal vorschieben und zubeißen lassen. Kerbe ebenfalls markieren.

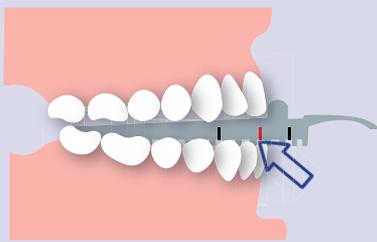

4. Schritt :

Bei max. 60 % der maximalen Protrusion eine Kerbe zur Fixierung der Unterkieferfront markieren.

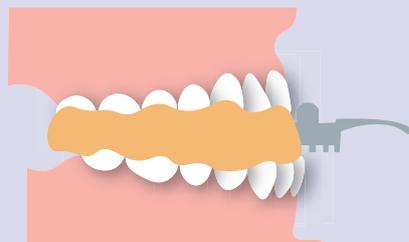


5. Schritt:

Nach Einbiss in besagte Kerbe, Bisslagefixierung mit Silikon o.ä.

CAVE: Mittellinie darf nicht verschoben werden


Intraoralscans

Bitte bei Nutzung von Intraoralscannern den Okklusionscan MIT eingesetztem Protrusionsbiss durchführen

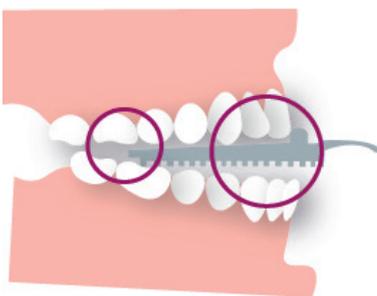


Sonderfälle

Bei offenem Biss oder starker SpeeKurve reicht die Höhe der Bissgabel manchmal nicht aus.

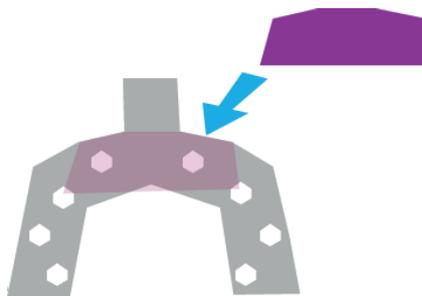

Beiliegend finden Sie ein **Erhöhungsböckchen**, das einfach auf die Bissgabel aufgeklickt werden kann.

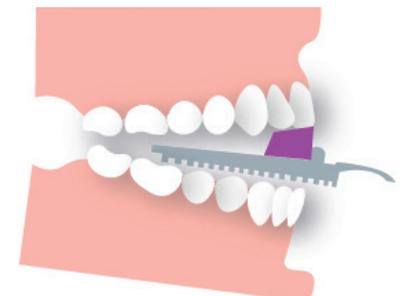

Mit erhöhter Bissgabel kann die Registrierung auch in diesen Fällen problemlos durchgeführt werden.

