



Gebrauchsanleitung für die ORTHOS-Bissgabel

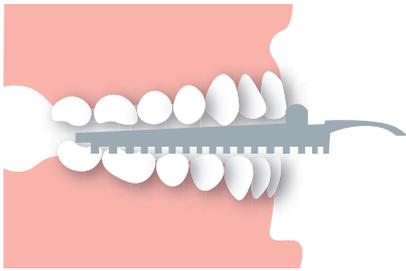


1. Schritt:

OK-Inzisiven an den Anschlag anstoßen lassen; Mittenmarkierung beachten. UK ohne Zahnkontakt 2-3 mal maximal vor und zurück schieben lassen.

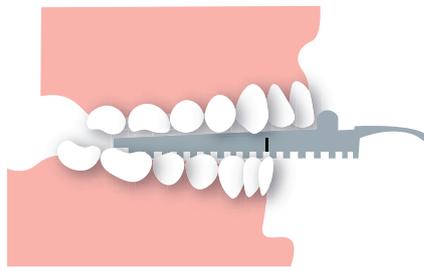


2. Schritt:

Bei retraler Lage zubeißen lassen und die Kerbe mit wasserfestem Stift markieren.

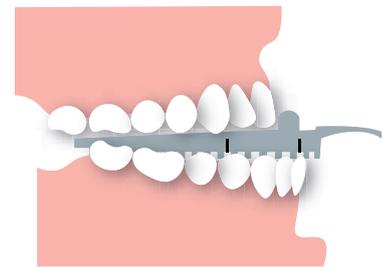

3. Schritt:

Patient* in maximal vorschieben und zubeißen lassen. Kerbe ebenfalls markieren.

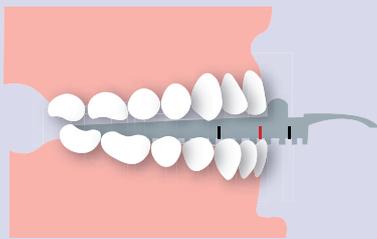

4. Schritt :


Bei 3/4 der maximalen Protrusion eine Kerbe zur Fixierung der Unterkieferfront markieren.



5. Schritt:


Nach Einbiss in besagte Kerbe, Bisslagefixierung mit Silikon o.ä.

CAVE: Mittellinie darf nicht verschoben werden

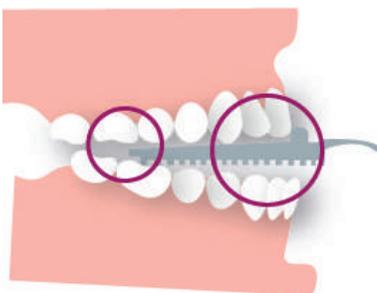


Sonderfälle

Bei offenem Biss oder starker SpeeKurve reicht die Höhe der Bissgabel manchmal nicht aus.

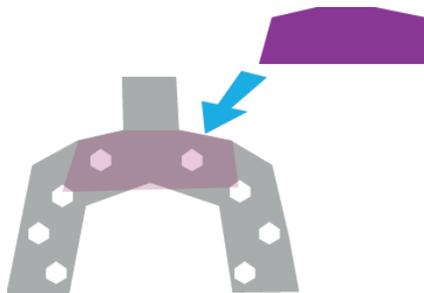

Beiliegend finden Sie ein **Erhöhungsblöckchen**, das einfach auf die Bissgabel aufgeklickt werden kann.

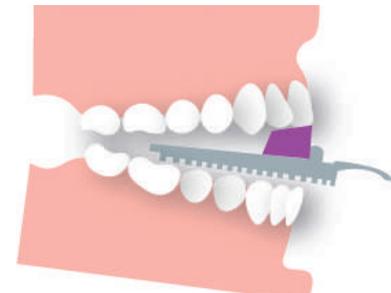

Mit erhöhter Bissgabel kann die Registrierung auch in diesen Fällen problemlos durchgeführt werden.

