



Für Perfektion, die bleibt

Retainer – Unsichtbarer Halt
für ein dauerhaft schönes Lächeln



Bleibend schön mit Retention

Nach der Zahnkorrektur – ist vor der Retention


Das schöne Ergebnis nach einer Zahnkorrektur ist beeindruckend. Doch ohne die passende Retentionsmaßnahme können sich die Zähne schnell wieder verschieben. Deshalb ist Retention kein optionaler Schritt, sondern ein wichtiger Abschluss jeder erfolgreichen kieferorthopädischen Therapie.

Unsere maßgefertigten Retainer bieten effektive Lösungen für unterschiedliche Patientenbedürfnisse – präzise abgestimmt und praxiserprobt.

Damit das Ergebnis begeistert – heute, morgen, immer.

Unsere Preise
orthos.de/preise



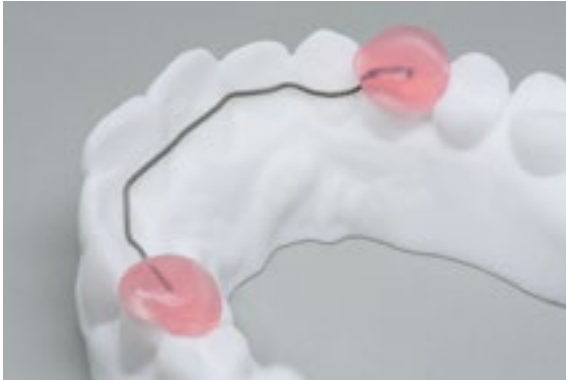


RotkäppchenRetainer®

Vorteile: Ermöglicht Eigenbeweglichkeit der Zähne, bedingt auch im Oberkiefer adaptierbar, extrem individuelle Anpassbarkeit, leicht zu platzieren durch die roten Käppchen

Nachteile: Erhöhte Plaque-Retention

Material: Twistflex, Titan (0,4mm)

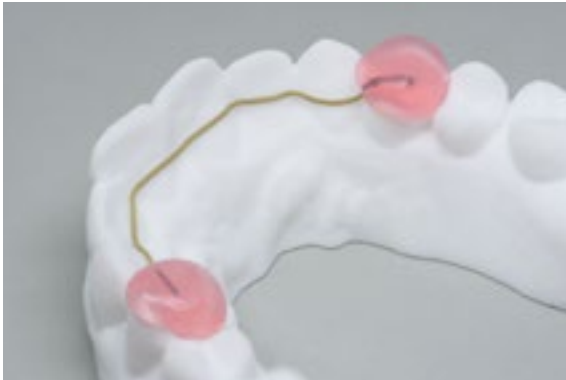


Retainer aus Gold

Vorteile: Auch im Oberkiefer adaptierbar, biokompatibel, ermöglicht Eigenbeweglichkeit, warme Farbe

Nachteile: Abhängig vom variablen Goldpreis

Material: Twistflex aus Gold

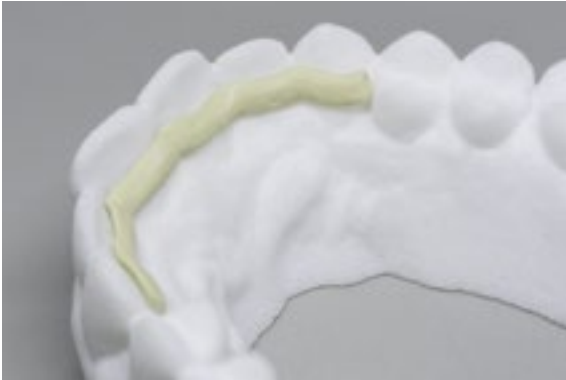

Peek Retainer

Vorteile: Flach, extrem unauffällig, verbindet sich gut mit dem Bonding, langer Halt

Nachteile: Bedarf hoher Klebgenauigkeit, erhöhte Plaque-Retention

Material: Peek (Polyetheretherketon)



3D OrthoRetain

Vorteile: Passgenau durch computergesteuerte Fertigung, erhöhte Stabilität, perfekter Tragekomfort

Nachteile: Feste Konstruktion, etwas dicker als Drahtretainer

Material: Titan



Miniplastschiene

Vorteile: Herausnehmbar, gut zu reinigen, unauffällig

Nachteile: Erfordert Disziplin vom Patienten, begrenzte Haltbarkeit

Material: Thermoplastische Tiefziehfolie (1 mm)



Memotain


Vorteile: Erleichterte Mundhygiene, zahnseidetauglich, passgenau, perfekter Halt für die Zähne bei maximaler Elastizität

Nachteile: Nur bei idealen Platzverhältnissen einsetzbar


Material: Nickel-Titan-Legierung

Unsere Easy Fit Klebeanleitung


Mit der **RotkäppchenRetainer® Technik von Orthos** geht das Kleben ganz einfach!

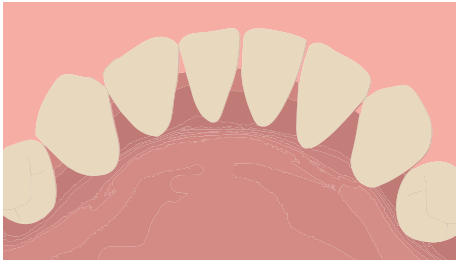


Am Ende der Zahnkorrektur kommt der RotkäppchenRetainer zum Einsatz, damit das Ergebnis lange erhalten bleibt.

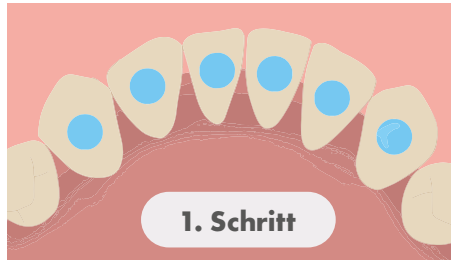


Das Ätzelgel aufbringen und mindestens 90 Sekunden einwirken lassen.

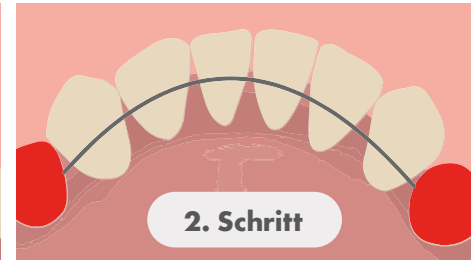


Danach den passgenau angefertigten RotkäppchenRetainer aufsetzen. Eine dritte Hand ist dabei nicht erforderlich.

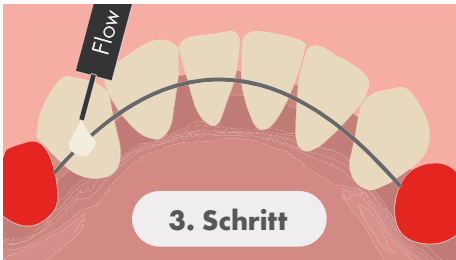

Verwenden Sie nach dem Bonden zum Kleben einen dünnfließenden Composite, z.B. Ihr Flow-Composite.

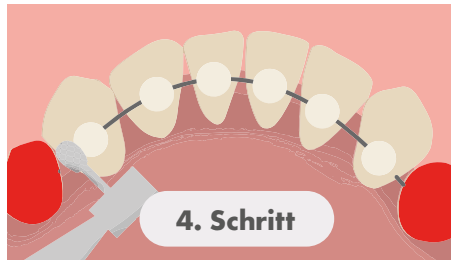

Nach dem Befestigen wird der Draht, z.B. mit einem Diamanten, distal des Eckzahns durchtrennt und anschließend poliert.

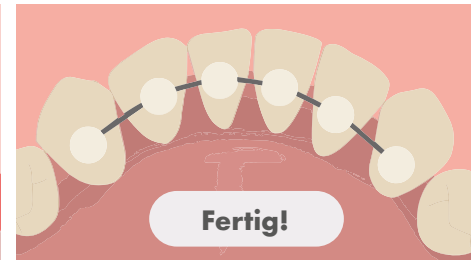

So bleibt das neue, strahlende Lächeln Ihrer Patienten mit geraden Zähnen lange erhalten. Glückwunsch!

ORTHOS Fachlabor

für Kieferorthopädie GmbH & Co. KG



Berner Straße 23
60437 Frankfurt am Main
Tel.: 069 71 91 00 0
info@orthos.de

Über der Nonnenwiese 7
99428 Weimar
Tel.: 03643 80 80 0
weimar@orthos.de



ORTHOS AG
Rathausstrasse 14
6341 Baar
Tel.: +41 (0)41 500 64 88
info@orthos-ag.ch



ORTHOS Austria GmbH
Am Rosendorn 17 A
2345 Brunn am Gebirge
Tel.: +43 (0)2236 38 42 32
info@orthos-austria.at

orthos.de
harmonieschiene.de/.ch/.at
schlafharmonie.de
auraschiene.de
kluge-kfo.de



@orthosfachlaborgmbh
@harmonieschiene
@schlafharmonie



Aufträge schnell über unser
KundenPortal anlegen +
jederzeit live einsehen



Ihr kurzer Weg zu unserer
Fachberatung: + 49 69 - 71 91 000
oder im Livechat auf: **orthos.de**



ORTHOS
Fachlabor