



Gebrauchsanleitung für die ORTHOS-Bissgabel

Bissgabel NICHT wiederverwendbar, 1 Bissgabel = 1 Patient
Bitte die restlichen Bissgabeln in der Praxis behalten, für Ihren nächsten Fall!

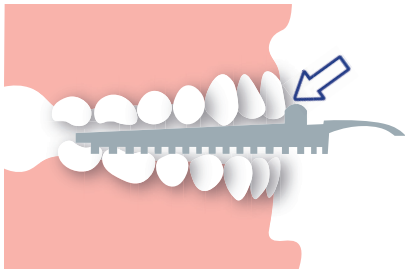


1. Schritt:

OK-Inzisiven an den Anschlag anstoßen lassen; Mittenmarkierung beachten. UK ohne Zahnkontakt 2-3 mal maximal vor und zurück schieben lassen.

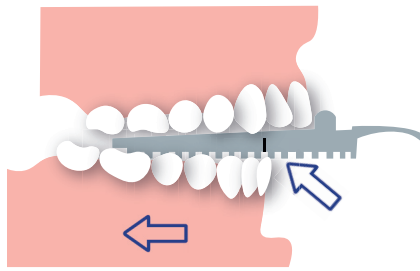


2. Schritt:

Bei retraler Lage zubeißen lassen und die Kerbe mit wasserfestem Stift markieren.

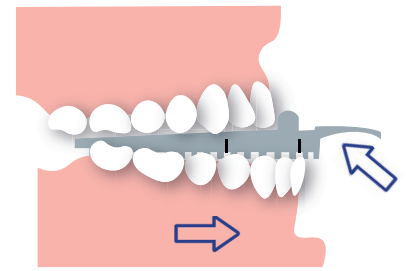


3. Schritt:

Patient* in maximal vorschieben und zubeißen lassen. Kerbe ebenfalls markieren.

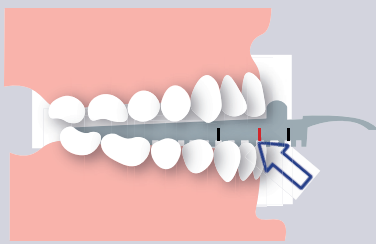

4. Schritt :

Bei max. 60 % der maximalen Protrusion eine Kerbe zur Fixierung der Unterkieferfront markieren.

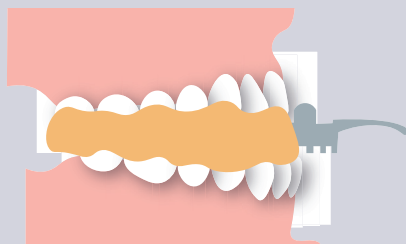


5. Schritt:

Nach Einbiss in besagte Kerbe, Bisslagefixierung mit Silikon o.ä.
CAVE: Mittellinie darf nicht verschoben werden.


Intraoralscans

Bitte bei Nutzung von Intraoralscannern den Okklusionscan MIT eingesetztem Protrusionsbiss durchführen

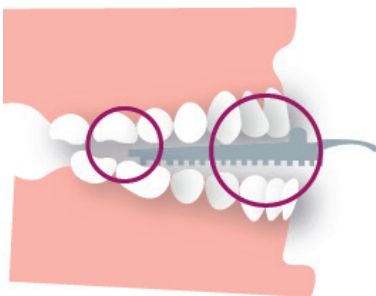


Sonderfälle

Bei offenem Biss oder starker Spee-Kurve reicht die Höhe der Bissgabel manchmal nicht aus.

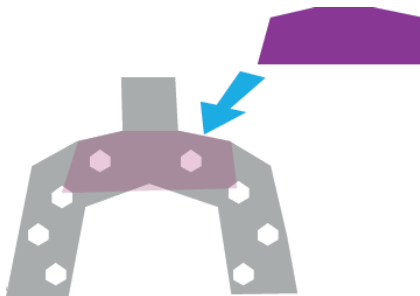

Beiliegend finden Sie ein **Erhöhungsböckchen**, das einfach auf die Bissgabel aufgeklickt werden kann.

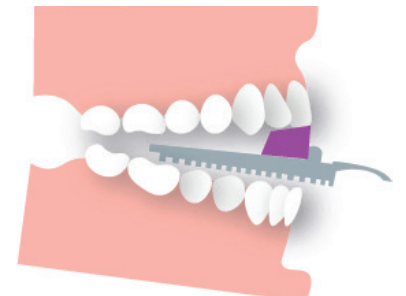

Mit erhöhter Bissgabel kann die Registrierung auch in diesen Fällen problemlos durchgeführt werden.

Videoanleitung zur Bissnahme

youtube.com/@LunaSol.Orthos



Diese und viele weitere Fragen beantworten wir in kurzen Erklärvideos auf unserem Kanal lunaSol.orthos.de auf **YouTube**

www.lunasol-orthos.de