

ORTHOS

Gebrauchsanleitung für die Orthos-Bissgabel

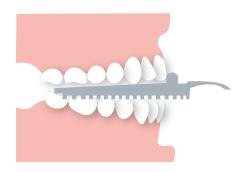

1. Schritt:

OK-Inzisiven in vorhandene Rille einbeißen lassen. UK ohne Zahnkontakt 2-3 mal maximal vor und zurück schieben lassen.

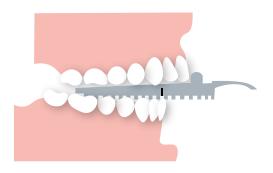

2. Schritt:

Bei retraler Lage zubeißen lassen und die Kerbe mit wasserfestem Stift markieren.




3. Schritt:

Patient*in maximal vorschieben und zubeißen lassen. Kerbe ebenfalls markieren.



4. Schritt:

Bei 3/4 der maximalen Protrusion eine Kerbe zur Fixierung der Unterkieferfront markieren.

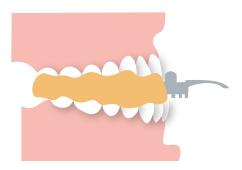

5. Schritt:

Nach Einbiss in besagte Kerbe, Bisslagefixierung CAVE: Mittellinie darf nicht verschoben werden

Bitte beachten Sie, dass die Einbisse der Prämolaren und Molaren zur eindeutigen Fixierung ausreichen.